




# PHAGO'SPRAY DASR

Désinfectant hydro-alcoolique  
pour les surfaces alimentaires sans rinçage

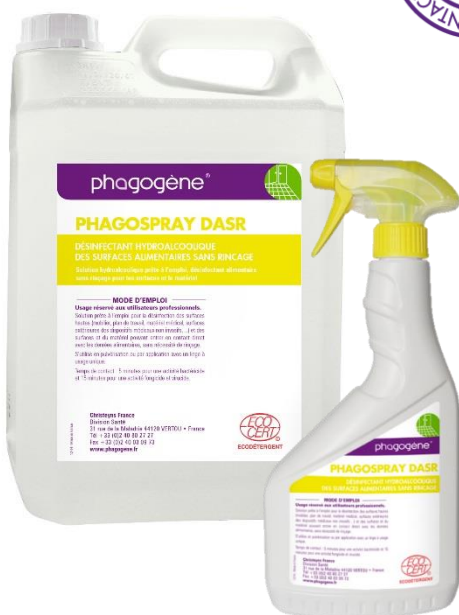

## Points forts

- ✓ Prêt à l'emploi
- ✓ Large spectre désinfectant
- ✓ Formule ecocertifiée
- ✓ Produit « contact alimentaire » sans rinçage

## Conditionnements

Présentation	Code	Nombre d'unité par carton
Flacon de 750 ml	65049	6 unités
Bidon de 5 litres	65050	2 unités



**CHRISTEYNS**  
LIFE SCIENCES

Christeyns France  
31, rue de la Maladrie - 44120 VERTOU - France  
Tel : +33 (0)2 40 80 27 27 / Fax : +33 (0)2 40 03 09 73  
www.christeyns.com



# PHAGO'SPRAY DAsR

## Domaine d'utilisation

- ✓ Le **PHAGO'SPRAY DAsR** est un désinfectant hydro-alcoolique pour la désinfection des surfaces, des équipements et des mobiliers propres. Ne laisse pas de traces sur les surfaces.
- ✓ Le **PHAGO'SPRAY DAsR** peut être utilisé en application sur un linge à usage unique pour la désinfection rapide du petit mobilier, des chariots, des surfaces extérieures des dispositifs médicaux non invasifs et des petites surfaces proches du malade.
- ✓ Le **PHAGO'SPRAY DAsR** peut être utilisé, sans rinçage sur les surfaces pouvant se trouver en contact direct avec les denrées alimentaires (table, plan de travail, plateaux, chariot de repas, trancheurs, hachoirs, couteaux...)
- ✓ Le **PHAGO'SPRAY DAsR** peut être également utilisé sur les jouets pour une désinfection complète.

## Composition

- ✓ Actif désinfectant:
  - Ethanol (N° CAS : 64-17-5) : 52,70% m/m
- ✓ Contient aussi : Eau, correcteur d'acidité
- ✓ 99,90% du total des ingrédients sont d'origine naturelle

TP2 – Désinfectant pour les surfaces, matériaux, équipements et mobilier sans contact direct avec les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux.

TP 4 – Désinfectant pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires.

## Caractéristiques organoleptiques et physico-chimiques

- ✓ Aspect : liquide limpide
- ✓ Couleur : incolore
- ✓ Odeur : alcool
- ✓ pH à 20°C (produit pur) : 5 à 7
- ✓ Point éclair : 23°C

## Mode d'emploi

- ✓ Le **PHAGO'SPRAY DAsR** est prêt à l'emploi.
- ✓ Pulvériser sur un linge à usage unique et appliquer sur la surface à désinfecter. Ne pas rincer.
- ✓ Pulvériser les surfaces préalablement nettoyées à une distance de 20 à 30 cm à raison de 30-40 ml/m<sup>2</sup>.
- ✓ Laisser agir 5 minutes pour une activité bactéricide et virucide; 15 minutes pour une activité fongicide.

## Compatibilité

- ✓ Faire un essai au préalable sur plexiglass.

## Précautions d'emploi

- ✓ Produit réservé à un usage professionnel
- ✓ Péréemption : 3 ans à partir de la date de fabrication.
- ✓ La fiche de données de sécurité est disponible sur le site [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.





# PHAGO'SPRAY DADR

## Activité antimicrobienne

Normes	Concentration	Temps
<b><u>BACTERICIDE</u></b>		
<b>EN 1040</b> ( <i>P. aeruginosa</i> et <i>S. aureus</i> )	100 %	5 min.
<b>EN 1276</b> ( <i>E. coli</i> , <i>E. hirae</i> , <i>P. aeruginosa</i> , <i>S. aureus</i> , <i>S. typhimurium</i> et <i>L. monocytogenes</i> )	100 %	5 min.
<b>EN 13727+A2</b> ( <i>E. hirae</i> , <i>P. aeruginosa</i> , <i>S. aureus</i> )	80%	5 min.
<b>EN 13697</b> ( <i>E. coli</i> , <i>E. hirae</i> , <i>P. aeruginosa</i> , <i>S. aureus</i> , <i>S. typhimurium</i> et <i>L. monocytogenes</i> )	100 %	5 min.
<b>EN 16615</b> ( <i>E. hirae</i> , <i>P. aeruginosa</i> , <i>S. aureus</i> )	100 %	1 min.
<b><u>FONGICIDE</u></b>		
<b>EN 1275</b> ( <i>C. albicans</i> et <i>A. niger</i> )	100 %	15 min.
<b>EN 1650</b> ( <i>C. albicans</i> et <i>A. niger</i> )	100 %	15 min.
<b>EN 13624</b> ( <i>C. albicans</i> et <i>A. niger</i> )	97%	15 min.
<b>EN 13697</b> ( <i>C. albicans</i> et <i>A. niger</i> )	100 %	15 min.
<b>EN 16615</b> ( <i>C. albicans</i> et <i>A. niger</i> )	100 %	5 min.
<b><u>MYCOBACTERICIDE</u></b>		
<b>EN 14348</b> ( <i>M. terrae</i> et <i>M. avium</i> )	97 %	5 min.
<b><u>VIRUCIDE</u></b>		
BVDV et Vaccinia virus selon RKI	100 %	5 min.
Actif sur HBV, HCV, HIV, Herpes virus, Coronavirus (inclus VRS), orthomyxovirus, Influenza A/H5N1 et Influenza A/H1N1	100 %	5 min.
<b>EN 14476+ A1</b> ( <i>Norovirus</i> et <i>Rotavirus</i> )	97 %	15 min.

Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur

<http://detergents.ecocert.com>

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



Christeyns France  
31, rue de la Maladrie - 44120 VERTOU - France  
Tel : +33 (0)2 40 80 27 27 / Fax : +33 (0)2 40 03 09 73  
[www.christeyns.com](http://www.christeyns.com)